



模型歯の脱着方法

○模型歯の外し方



1
付属のドライバーを用いて顎模型の裏側の模型歯固定用ネジを外します。



2
模型歯を抜き取ります。

この時、固定用ネジが模型歯に残っていないことを確認してから抜き取ってください。無理に引き抜くと模型歯のネジ穴が潰れ、再固定できなくなることがあります。

○模型歯の取り付け方



1
模型歯を正しい位置に差し込みます。



2
模型に付属のドライバーを用いて、顎模型の裏側から固定用ネジを仮止めします。



3
すべての模型歯を仮止め後、咬合器を閉じます。正しく噛み合った状態で固定用ネジを締めつけます。

ここでは強く締めないよう
にしてください。

この時、強く締めすぎるとネジ穴が潰れることがあります。ネジ穴が潰れるとネジが空回りして再固定できなくなります。模型歯が動かない程度の軽い力で締めてください。



模型歯用プラスドライバー

模型歯を顎模型に固定する際に使用するドライバーです。ネジ止め仕様の全モデルに付属しています。



模型歯固定用ネジ

模型歯を固定するためのネジです。ネジ止め仕様の全モデルに付属しています。

- 容量
- 1本入



咬合器の着脱方法

○咬合器の外し方



付属のドライバーを用いて咬合器固定用ネジ4本を外します。

咬合器を外す時、咬合器の種類によっては、バネの力で咬合器が勢よく閉じることがあります。指を挟まないように注意してください。


○咬合器の取り付け方



咬合器の上下に注意して、上顎に固定用ネジ2本を仮止めします。



同様に下顎を仮止めします。

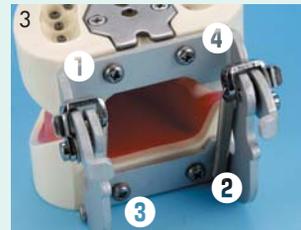

模型を正しく咬合させた状態で固定用ネジを写真の順番で締めつけます。



咬合器固定用ネジ

咬合器を模型に固定するためのネジです。FE咬合機、D咬合器用の2種類あります。

種類／容量

- FE咬合器用固定ネジ 4本入
- D咬合器用固定ネジ 4本入



FE咬合器

開口位、最大開口位で固定できる各種咬合運動が可能な咬合器です。



D咬合器

机上などに置いて実習する際、180°以上開口できる咬合器です。各種咬合運動は可能ですが開口位で固定はできません。

※咬合器は、装着のため予め顎模型にネジ穴が必要です。ネジ穴がない模型の場合はお問い合わせください。



粘膜の着脱方法

○粘膜の外し方



1
模型歯を1本おきに取り外します。
〔「模型歯の外し方」参照 / P18〕



2
粘膜をゆっくりと外します。

粘膜は非常にデリケートな素材で作られています。強く引っ張ったり、鋭利なもので引っかけたりすると破れたり伸びたりする原因となります。取扱いには、注意してください。

○粘膜の取り付け方



1
粘膜を模型に装着します。



2
模型歯を挿入します。



3
模型歯固定ネジを締め付け固定します。
〔「模型歯の取り付け方」参照 / P18〕