

義歯・マウスピースを お使いの皆様



口腔内装置洗浄剤

キラリ

院内価格

ヨゴレもニオイも
スッキリ洗浄

除菌力
99.9%

洗浄前



洗浄中



洗浄後



しつこいやニ汚れ等もしっかり洗浄します。

使用可能材料

義歯




総義歯
金属床義歯
3Dプリンター義歯



部分床義歯
ノンクラスプ
デンチャー

マウスピース

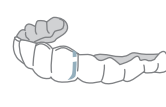

マウスピース
ナイトガード

矯正装置




矯正用リテーナー
アライナー

ティッシュコンディショナーにはお使いいただけません

使用方法

1

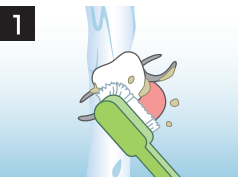

洗浄前に口腔内装置に付着した汚れなどをブラシ等を用いて、流水で洗い流してください。

2



150mL程度のぬるま湯(〜40℃)にキラリ錠剤を1錠を入れてください。

※保温洗浄器(別売)の使用がより効果的です。

3



口腔内装置は30分以上浸けてください。一晚浸けておくとより効果的です。

4



ブラシ等を用いて流水でよくすすいでください。

使用上の注意

- 本剤や洗浄液は口や目の中に入れないでください。
- 小児や第三者の監督が必要な方の手の届かない所に保管してください。
- 高温・多湿となる場所に長時間放置しないでください。本剤が膨張・変質する原因となります。